

# DeoShower



Future Care Technologies



## Manuale utilizzatore

**1** **Prodotto:**  
DeoShower  
**Realizzato da:**  
Industrie De Nora S.p.A.

**2** **Per l'assistenza tecnica  
contattare:**  
Industrie De Nora S.p.A.  
Via Bistolfi 35, 20134 Milano,  
Italia  
Tel: +39 (340) 9912737  
Fax: +39 02 21292831  
Email:  
info@denoranext.com

## Leggere prima dell'uso

Per ottenere le migliori prestazioni, Industrie De Nora S.p.A. raccomanda di leggere attentamente l'intero manuale prima di procedere all'installazione e all'uso dell'apparecchio. Conservare il presente manuale in un luogo facilmente accessibile, affinché gli operatori possano consultarlo in qualsiasi momento.

1.0	Usò del manuale	3
2.0	Precauzioni e avvertenze generali	4
	2.1 Dichiarazione di conformità	
	2.2 Misure di sicurezza	
3.0	Descrizione	7
	3.1 Dati tecnici di Deoshower	
	3.2 Nome dei componenti	
	3.2.1 Deoshower: panoramica	
	3.2.2 Parte anteriore del corpo principale	
	3.2.3 Pannello operativo	
	3.2.4 Maniglia	
	3.2.5 Doccetta	
	3.2.6 Portadoccetta	
	3.2.7 Portatubo	
	3.2.8 Super Jetter	
	3.2.9 Tubo irrigatore	
	3.2.10 Irrigatore	
4.0	Installazione	13
	4.1 Preparazione di DeoShower	
	4.2 Pedale	
5.0	Manutenzione di Deoshower	18
	5.1 Dopo l'uso	
	5.2 Pulizia dell'interno del serbatoio	
	5.3 Pulizia del filtro	
	5.4 Manutenzione della doccetta	
	5.5 Sostituzione della cella interna	
6.0	Risoluzione dei problemi	20



# 1.0 Uso del manuale

Grazie per aver acquistato DeoShower e i relativi accessori. Lo scopo del presente manuale è fornire all'operatore le seguenti informazioni:

- misure di sicurezza
- istruzioni per l'installazione
- istruzioni di funzionamento
- istruzioni per la manutenzione ordinaria

Il presente manuale deve essere conservato in un luogo facilmente accessibile.

Leggere attentamente il manuale prima di mettere in funzione il dispositivo.

Rispettare le relative avvertenze e precauzioni nelle fasi di installazione, funzionamento e manutenzione di DeoShower e dei relativi accessori.

La responsabilità della messa in funzione e dell'uso di DeoShower e dei relativi accessori in conformità con le istruzioni del presente manuale ricade sull'operatore. Se il dispositivo viene usato in modi diversi rispetto a quanto indicato nel manuale, Industrie De Nora S.p.A. non fornirà alcuna garanzia e non si assumerà la responsabilità di eventuali danni a persone o cose. In caso di malfunzionamenti che richiedano l'intervento di un tecnico specializzato, contattare:

Industrie De Nora S.p.A., Via Bistolfi 35, 20134 Milano, Italia  
Tel: +39 (340) 9912737 - Email: [info@denoranext.com](mailto:info@denoranext.com)

Il manuale fornisce  
all'operatore  
le informazioni  
essenziali

ALLEGATO:  
Manuale utilizzatore (con garanzia).  
Conservarlo in un luogo sicuro.



## 2.0 Precauzioni e avvertenze generali

### 2.1 Dichiarazione di conformità

Industrie De Nora S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme alle seguenti direttive:



- 2006/95/CE (LDV)
- 2004/108/CE (EMC)

Norme europee:

- EN 61010-1: 2010
- EN 61326-1: 2006

### 2.2 Misure di sicurezza

Per prevenire lesioni o danni agli utenti o ad altre persone, osservare le seguenti istruzioni. Nel presente manuale le misure di sicurezza sono suddivise in AVVERTENZE e PRECAUZIONI.

	<b>AVVERTENZE</b> Se queste istruzioni non sono rispettate, il dispositivo può danneggiare oggetti, procurare lesioni a persone o persino il decesso.
	<b>PRECAUZIONI</b> Se queste istruzioni non vengono rispettate, il dispositivo può danneggiare più o meno gravemente gli oggetti o procurare lesioni personali.



## AVVERTENZE

### Simboli di avvertenza presenti sull'apparecchio



Rischio di incendio.



Non smaltire il prodotto tra i rifiuti solidi urbani, ma portarlo presso le apposite strutture di raccolta dei rifiuti.



Istruzioni importanti sul funzionamento e la manutenzione (ordinaria) nel materiale informativo in dotazione con il prodotto. Leggere attentamente il manuale.

- Non installare l'apparecchio in locali classificati a rischio di esplosione per la presenza di vapore/polveri/gas infiammabili.
- Al fine di prevenire incendi, esplosioni o lesioni, non mettere in funzione l'apparecchio vicino a gas infiammabili, pericolosi o corrosivi. Non cercare di smontare, riparare o modificare il dispositivo da soli: un intervento non corretto potrebbe generare scariche elettriche e incendi.
- Non introdurre oggetti nel serbatoio del dispositivo.
- Solo il personale autorizzato da Industrie De Nora S.p.A. può riparare DeoShower.
- La soluzione prodotta da DeoShower contiene ozono. Si tratta quindi di - ACQUA NON POTABILE - che NON deve essere inghiottita. Se utilizzata per l'igiene orale utilizzare sempre un aspiratore.
- Il dispositivo va collegato a terra in modo corretto.
- Servirsi sempre di un impianto elettrico dotato di messa a terra.
- Collegare il dispositivo solo a una fonte di energia elettrica da 100-230V ~ 50/60Hz.
- Non usare l'apparecchio quando la spina o il cavo di alimentazione presentano segni di danneggiamento; non usare la presa di alimentazione se è allentata: si potrebbero generare scosse elettriche, cortocircuiti, incendi o scintille.
- Non estrarre la spina dalla presa con le mani bagnate. È vietato toccare l'apparecchio con le mani bagnate: pericolo di lesioni o scossa elettrica.
- È vietato il contatto con l'acqua: non bagnare l'apparecchio né immergerlo in acqua. Pericolo di scosse elettriche, cortocircuiti, incendi o scintille.
- Per estrarre la spina: scollegarla dalla presa di alimentazione prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio. In caso contrario, si possono generare scosse elettriche o lesioni.
- Non danneggiare, piegare con forza, tirare, torcere, attorcigliare, stringere, schiacciare o manomettere il cavo nel riporlo: si potrebbe danneggiare il cavo o provocare un incendio o una scossa elettrica.



## PRECAUZIONI

- L'uso dell'apparecchio non è consentito a persone anziane, bambini e a coloro che sono impossibilitati ad agire autonomamente, per evitare il rischio di lesioni.
- Usare solo acqua demineralizzata con le seguenti specifiche: durezza: 0°f, temperatura: 5~40°C. Pericolo di guasto o incidente.
- Non usare acqua calda la cui temperatura superi i 40°C: pericolo di guasto, ustioni o incidenti.
- Non piegare o danneggiare i flessibili della doccetta. Pericolo di guasto o incidente.
- Usare l'apparecchio in locali ben aerati per evitare un danno alla salute.
- Evitare che il terminale o la polvere entrino in contatto con la spina di alimentazione elettrica. Si potrebbero generare scosse elettriche, cortocircuiti o scintille.
- Se l'apparecchio viene inclinato, potrebbe fuoriuscire acqua dal serbatoio: appoggiare il serbatoio su una superficie stabile, facendo attenzione a non inciampare sul cavo.
- Se il funzionamento viene interrotto e la doccetta è appoggiata a terra, l'acqua ozonizzata potrebbe fuoriuscire. Collocare la doccetta nell'apposita zona di recupero del corpo principale.
- Una volta terminato l'utilizzo dell'apparecchio, lasciare scorrere l'acqua e svuotare il serbatoio fino a quando l'apparecchio si ferma automaticamente.
- Svuotare il serbatoio quando si trasporta l'apparecchio in auto.
- Tenere l'apparecchio sempre pulito e usare acqua demineralizzata per le operazioni di pulizia. Se l'apparecchio viene lasciato sporco si forma la muffa, che può risultare pericolosa per la salute. Inoltre, la muffa determina la formazione di cattivi odori e può causare guasti.
- Dopo l'uso, l'apparecchio va riposto in ambienti con condizioni stabili e un basso livello di umidità. La corrosione dei componenti elettronici dovuta all'umidità potrebbe provocare guasti.
- Interrompere l'utilizzo del prodotto quando il serbatoio è vuoto o il flusso di acqua si interrompe.
- Far trascorrere 1 minuto e 30 secondi fra un utilizzo e l'altro.

DeoShower è un dispositivo elettronico per la produzione in loco di acqua ozonizzata per trattamenti igienici veterinari. È disponibile in due versioni: Standard per l'igiene della cute e Ozone Oral Irrigator per l'igiene dentale.

## 3.0 Descrizione


### 3.1 Dati tecnici DeoShower

Materiale	ABS, PC, PP, PVC, EPDM, metalli
Dimensioni	Corpo: 250mmx150mmx300mm (LxPxA); lunghezza cavo di alimentazione: 2 m Lunghezza tubo doccetta: 1,5 m (Modello Standard) Lunghezza tubo flessibile: 0,30 m (Modello Ozone Oral Irrigator)
Peso	1,8 kg (vuoto)
Capacità serbatoio acqua	1,5 l max
Acqua di alimentazione	Acqua distillata (durezza 0°f); Temperatura acqua: 5~40°C
Tensione di alimentazione	CA100-230V
Frequenza di alimentazione	50/60Hz
Potenza	80W max
Temperatura ambiente	5°- 40°C
Umidità ambiente	10-95% (senza condensa)
Altitudine	2000 m max
Portata acqua	550 ml/min (Modello Standard) 40 ml/min-320 ml/min a seconda del dispositivo connesso (Modello Ozone Oral Irrigator)
Concentrazione ozono nell'acqua	1,5 mg/l - T=15°C; 0°f (Modello Standard) ~ 5 mg/l - T=15°C; 0°f (Modello Ozone Oral Irrigator)
Emissioni nell'aria	Gas idrogeno (1 g/min max) durante l'erogazione della soluzione; emissione di ozono trascurabile
Categoria di installazione	2
Grado di inquinamento	2
Fusibile	F101 CA250V HT 3,15A
Durata cella	100 ore


Le fluttuazioni di tensione non devono superare +/- 10% della tensione nominale di alimentazione.

## 3.2 Nome dei componenti

### 3.2.1 DeoShower: panoramica

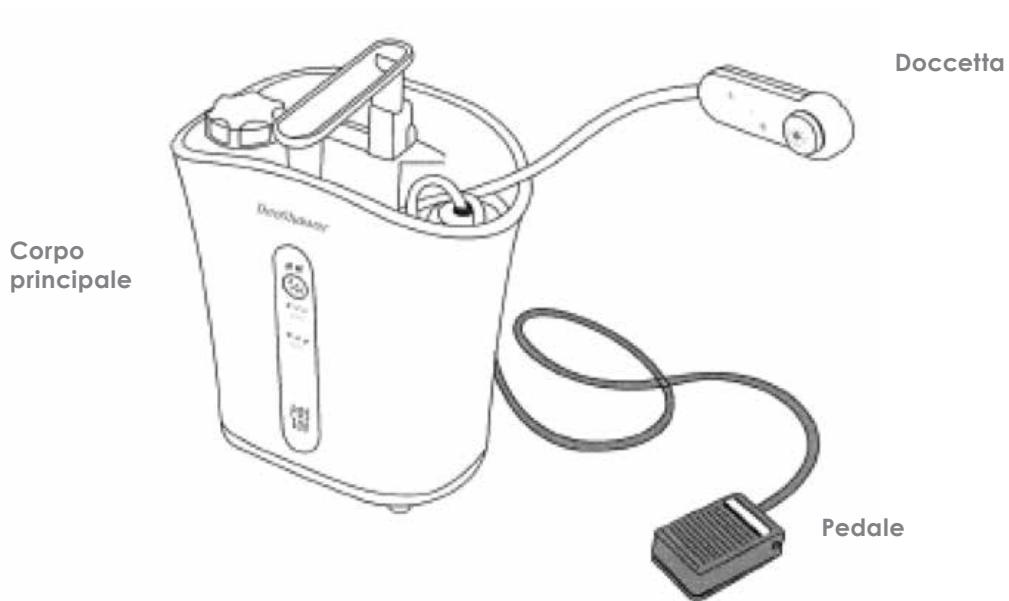


### 3.2.2 Parte anteriore del corpo principale

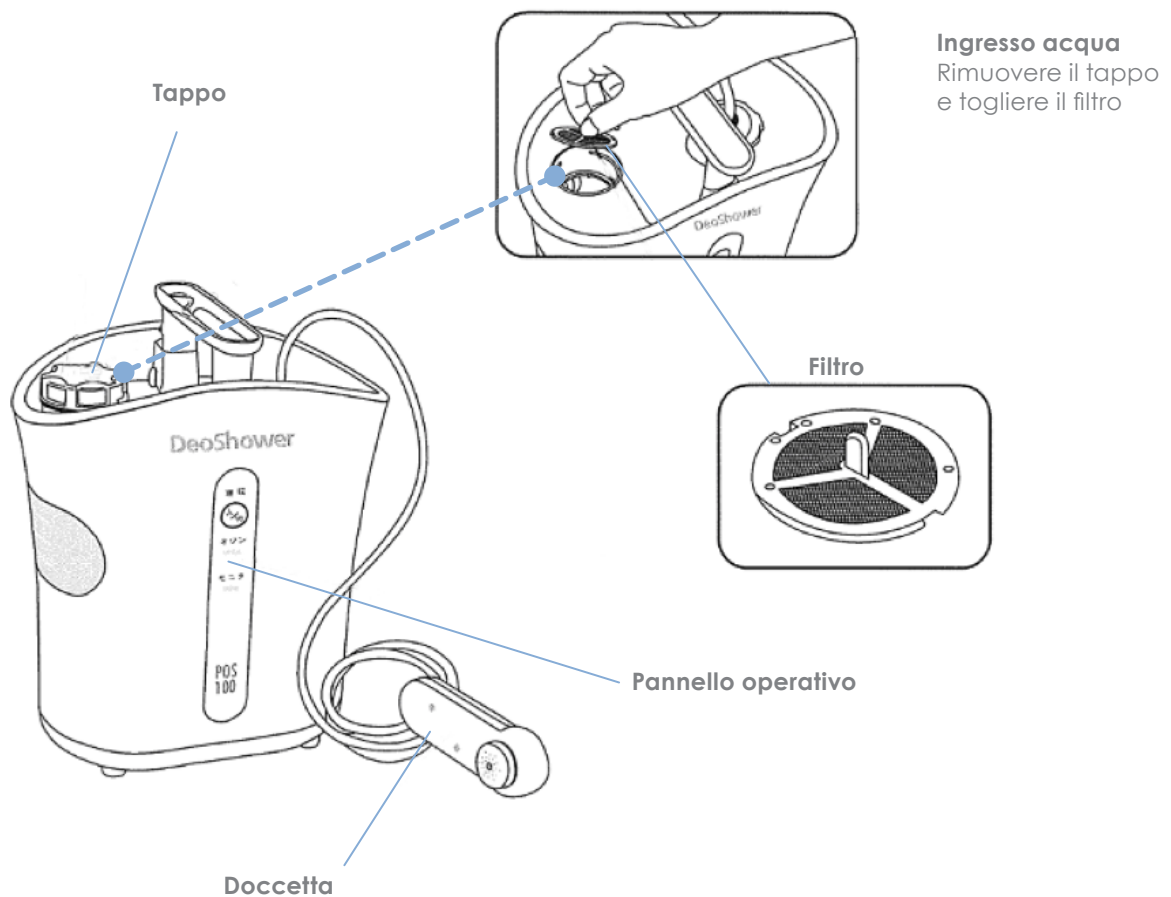



### 3.2.3 Pannello operativo

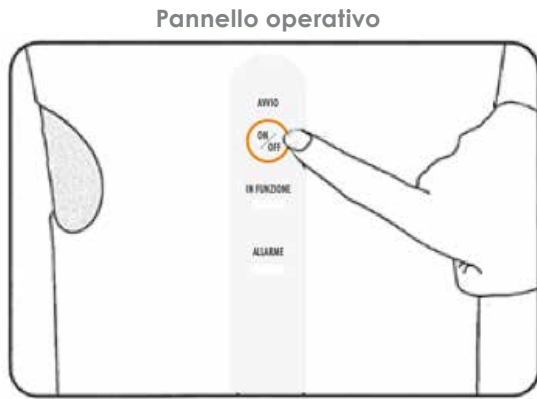

AVVIO



IN FUNZIONE

ALLARME

#### Accensione/spegnimento

Il tasto accende/spegne l'unità.

#### In funzione (spia verde)

Si accende quando l'unità è alimentata elettricamente e lampeggia quando in funzione.


#### Allarme (spia rossa)

La spia rossa si accende in caso di anomalia. In caso di surriscaldamento si spegne e ritorna operativo dopo 5-10 minuti.

POS  
100

#### Maniglia

Utilizzare la maniglia per trasportare l'unità. Inoltre, è possibile avvolgerci il cavo intorno.

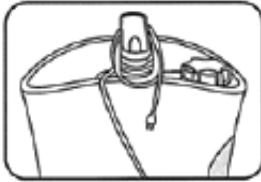

#### Serbatoio acqua

Il volume del serbatoio è 1.3l (1.5l quando pieno).



Vista laterale del corpo principale

Pedale


Presca di alimentazione

#### Selezionare getto

Due tipi (Doccia/Diretto)




### 3.2.5 Doccetta (Modello Standard)

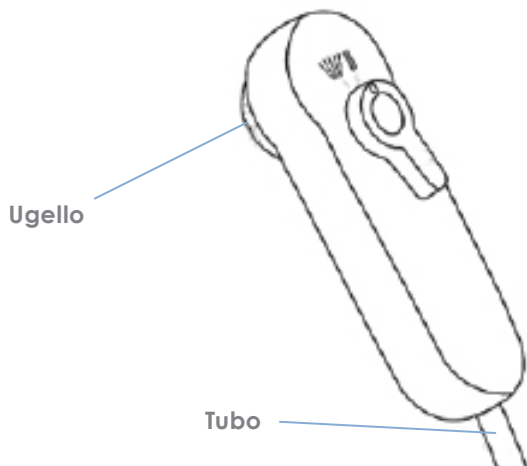

Ugello

Tubo

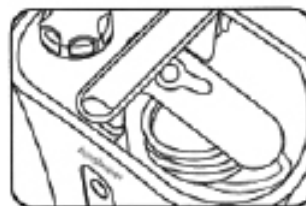


#### Esempio di stoccaggio

È possibile riporre la doccetta al di sopra dell'unità

### 3.2.4 Maniglia


### 3.2.6 Portadocchetta (Modello Standard)

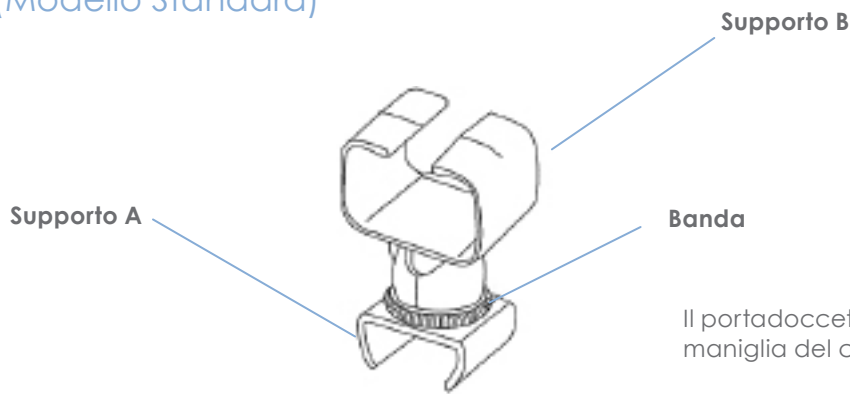

Il portadocchetta si fissa sulla maniglia del corpo principale

Materiale: ABS


#### Modalità di funzionamento

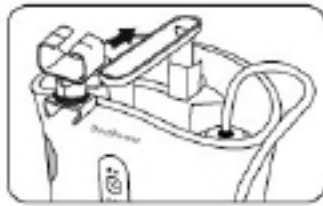

**1** Inserire il supporto A sulla maniglia (spingere finché non si sente un click).




**2** Inserire la docchetta nel supporto B.

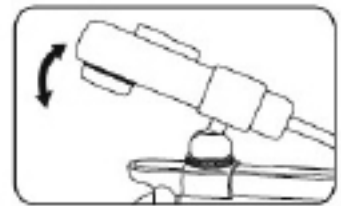

**3** Asciugarlo accuratamente, e smontarlo procedendo nell'ordine inverso.

### 3.2.7 Portatubo (Modello Standard)

Procurarsi sempre un tubo flessibile con ghiera. Per la rimozione, è sufficiente premere il tasto di blocco. Questo meccanismo è comodo, ad esempio, quando si versa acqua ozonizzata in un contenitore.

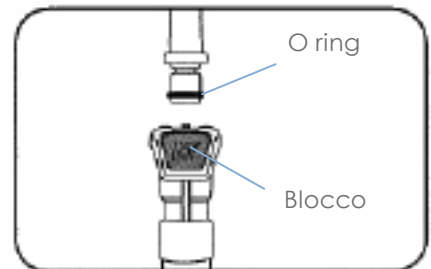

#### Modalità di funzionamento



**1** Attaccare la ventosa su un lato dell'unità.



**2** Attaccare il tubo della docchetta al portatubo.




**3** Smontare la docchetta e utilizzare.

#### Precauzioni nell'uso del porta tubo

- Prima di rimuovere la ghiera, verificare che l'apparecchio sia spento.
- Non danneggiare e non rimuovere la guarnizione circolare fissata alla sezione sporgente della ghiera (sul lato del corpo principale).


La ghiera potrebbe allentarsi, con la conseguente fuoriuscita di acqua ozonizzata.

### 3.2.8 Super Jetter (Modello Standard)

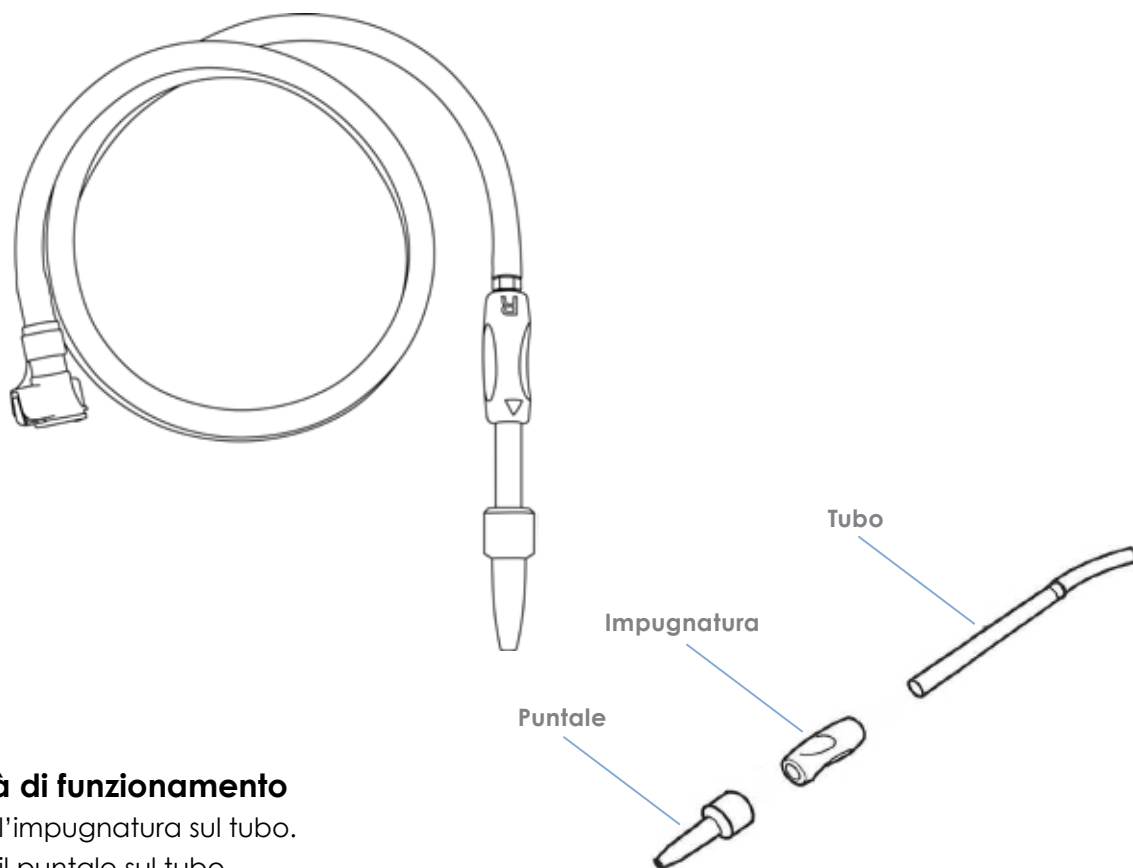

#### Modalità di funzionamento


1. Inserire l'impugnatura sul tubo.
2. Inserire il puntale sul tubo.
3. Rimuovere la doccetta fissata all'unità principale e collegare il Super Jetter.

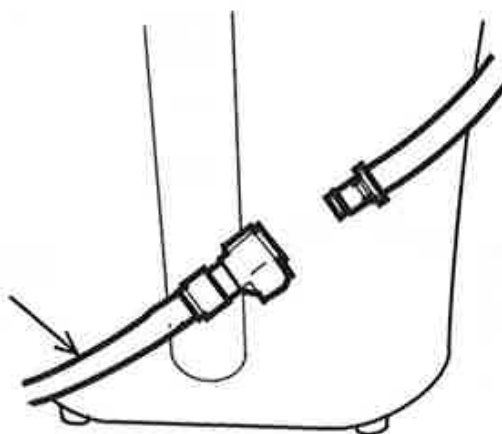

#### Precauzioni nell'uso del Super Jetter

- In caso di sterilizzazione, estrarre il puntale (temperatura massima: 200°C) dal tubo dell'unità principale e sterilizzarlo in autoclave (20 minuti a 121°C). Si consiglia di non eccedere la temperatura di sterilizzazione per non deteriorare Super Jetter.
- La spia si accende quando l'emissione di acqua si arresta per diversi secondi a causa dell'otturazione del puntale. Staccare la spina dalla presa elettrica, accertarsi che la spia sia spenta e riposizionare il puntale.

### 3.2.9 Tubo irrigatore (Modello Ozone Oral Irrigator)



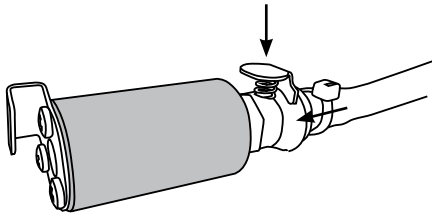


#### Adattatore

Collegare l'adattatore al tubo principale premendo la leva metallica.

Collegare il tubo irrigatore all'adattatore.


1. Orientare in orizzontale la linguetta alla base del tubo.
2. Bloccare il tubo irrigatore ruotando in verticale la linguetta alla base del tubo.

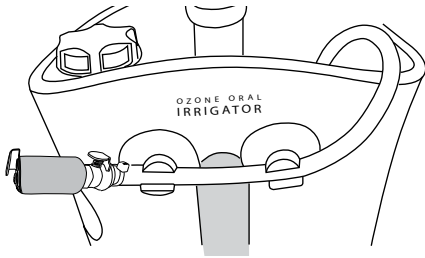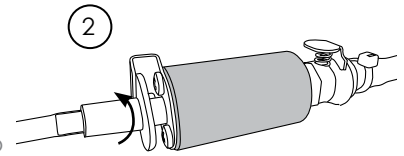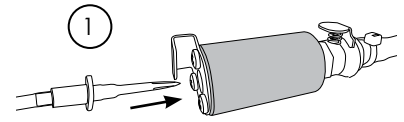

#### Porta tubi (x2)

Attaccare una ventosa al corpo di DeoShower. Quindi fissare il tubo irrigatore.


Se necessario utilizzare due ventose come mostrato nell'immagine.

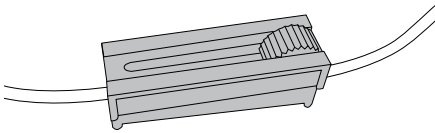

#### Regolatore di flusso



Connettere il regolatore di flusso al tubo irrigatore. Ruotare la rotella per regolare il flusso di acqua ozonizzata o per prevenire fuoriuscite dell'acqua rimanente nel tubo a fine utilizzo.

### 3.2.10 Irrigatore (Modello Ozone Oral Irrigator)

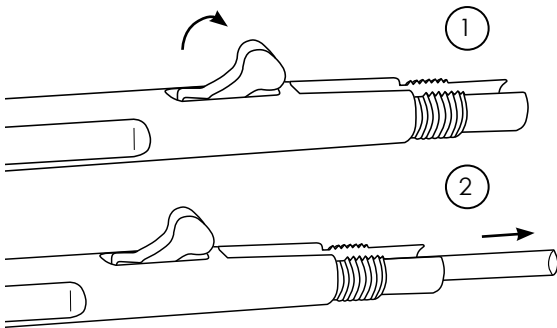

3. Connettere l'estremità del tubo irrigatore alla punta dell'irrigatore. Inserire la punta dell'irrigatore all'interno del corpo.



4. Inserire il dado di fissaggio.

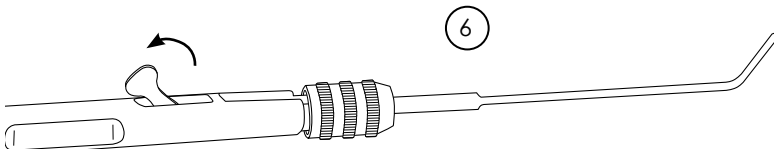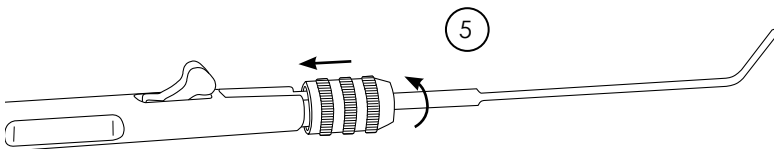

#### Indicazioni per assemblaggio

1. Abbassare la leva di sicurezza.

2. Inserire il tubo irrigatore all'interno del corpo irrigatore.

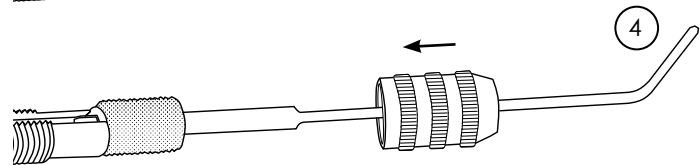
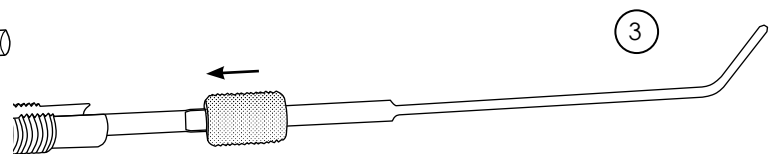


5. Avvitare il dado di fissaggio.

6. Alzare la leva di sicurezza.



1. Non installare in un ambiente in cui siano presenti gas velenosi o fuoco e non esporre alla luce diretta del sole.
2. Installare in un ambiente ben ventilato. Nel caso in cui si avverta l'odore di ozono, ventilare aprendo la finestra o avviando la ventola.
3. Installare su una superficie piana e in equilibrio.

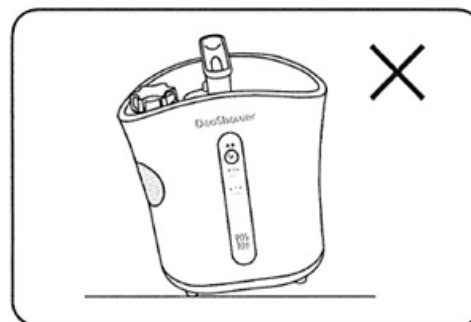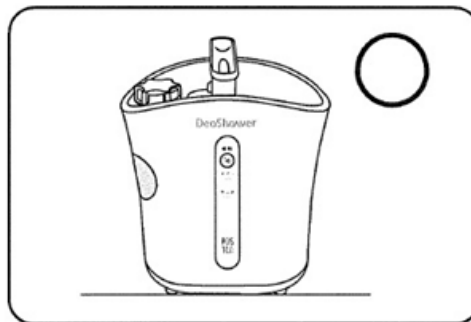

ATTENZIONE 

- Non spostare DeoShower mentre è in funzione.
- Se è necessario spostare l'apparecchio, spegnerlo e tenerlo sempre in posizione verticale. Non capovolgerlo.
- Utilizzare la spina per collegare il dispositivo alla rete elettrica CA. La presa di corrente deve essere collocata in prossimità dell'apparecchio ed essere facilmente raggiungibile.



## 4.1 Preparazione di DeoShower


Equipaggiare DeoShower con il dispositivo più consono al tipo di applicazione: Doccetta, SuperJetter o Irrigatore.




Riempire il serbatoio con acqua demineralizzata.



Inserire la spina nella presa elettrica.

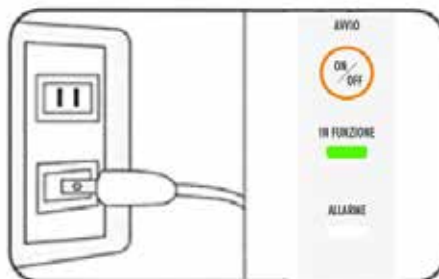

Premere il pulsante di avvio: dal dispositivo connesso fuoriesce acqua ozonizzata.

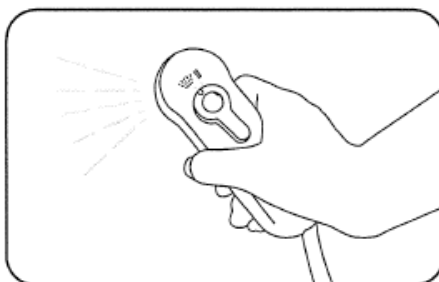

In alternativa, DeoShower può essere avviato premendo il pedale.



Tenere il dispositivo con l'altra mano.

- L'apparecchio si arresta automaticamente non appena termina l'acqua del serbatoio.
- Per metterlo in pausa durante il funzionamento, premere il pulsante di avvio.





Il pedale permette di scegliere tra 3 diverse modalità di funzionamento: getto continuo, getto pulsante (Modello Standard) o getto a comando (Modello Ozone Oral Irrigator). L'azionamento attraverso il pulsante ON/OFF avvia solamente la modalità getto continuo.



### Modalità di funzionamento



#### Modalità getto continuo

Premere una volta il pedale e rilasciare subito per avviare il getto continuo. Premerlo nuovamente per interrompere l'emissione.

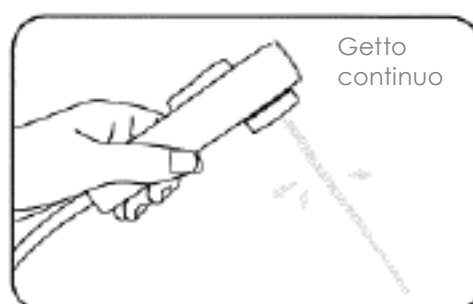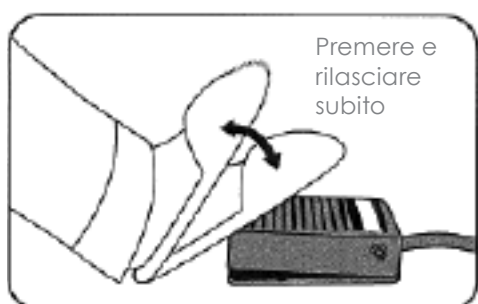



### Modalità getto pulsante (Modello Standard)

Il getto pulsante continua fino a quando il pedale viene tenuto premuto. L'apparecchio si arresta non appena si interrompe la pressione sul pedale. Il volume di ciascuna emissione corrisponde a circa 1 cc. Dopo 10 emissioni l'apparecchio si arresta automaticamente, anche se si continua a premere il pedale. Dal momento che il getto pulsante emette a intermittenza circa 1 cc alla volta, utilizzarlo quando è necessaria una piccolissima quantità d'acqua ozonizzata o un'emissione delicata.

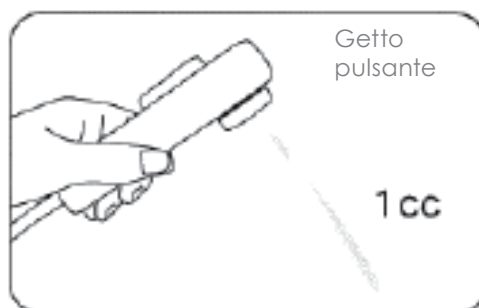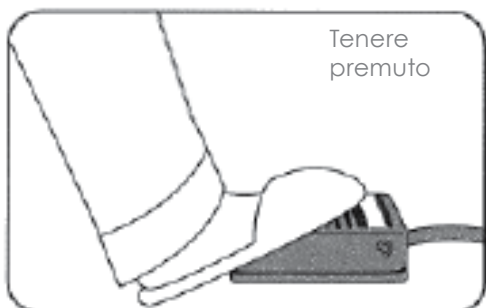

### Modalità getto a comando (Modello Ozone Oral Irrigator)




Il getto a comando continua fino a quando il pedale viene premuto. Il flusso si interrompe rimuovendo il piede dal pedale.

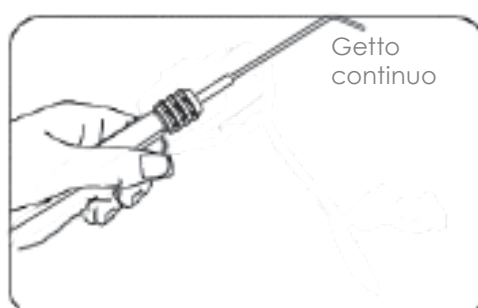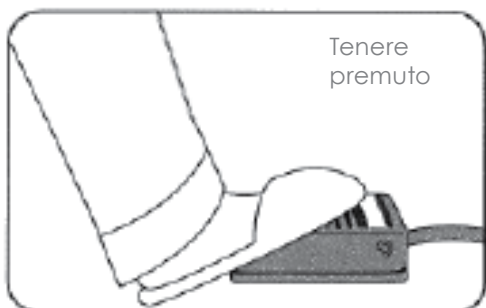



## Precauzioni per l'uso

- Quando l'apparecchio viene messo in funzione per la prima volta o se non è stato utilizzato per un periodo lungo, fare scorrere 1 litro d'acqua circa al suo interno prima di iniziare a utilizzarlo.
- Non spruzzare acqua sull'area principale e non immergere l'apparecchio in acqua: non è impermeabile.
- Non inclinare l'apparecchio e non appoggiarlo su un fianco quando è presente acqua nel serbatoio: potrebbero verificarsi fuoriuscite d'acqua. La struttura non è perfettamente ermetica.
- Quando la spia rossa lampeggia e il dispositivo si arresta, staccare la spina dalla presa di corrente, aspettare 10 minuti e reinserire la spina.
- Riempire il serbatoio dopo 1 minuto e 30 secondi dall'ultimo utilizzo.
- Il cavo del pedale non può essere rimosso. Non utilizzare un utensile per allentare il dado e non tirare il cavo con forza.

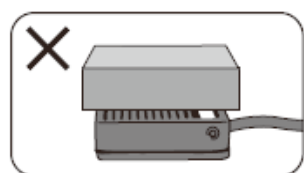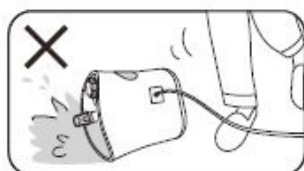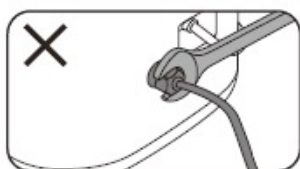

- Fare attenzione a non inciampare sul cavo: potrebbe rompersi. È anche possibile che qualcuno cada e si ferisca, oppure che cada l'apparecchio con conseguente fuoriuscita d'acqua dal serbatoio.
- Non bagnare il pedale direttamente con acqua e non utilizzarlo in un ambiente polveroso. La ruggine o la polvere potrebbero provocarne il blocco.
- Non salire sul pedale e non appoggiarvi sopra oggetti, per non rischiare danni o malfunzionamenti.



## 5.0

# Manutenzione di DeoShower

## 5.1 Dopo l'uso

- Svuotare il serbatoio.
- Nel caso in cui siano presenti macchie, strofinare con un panno morbido oppure bagnare un panno con detergente diluito, strizzarlo e strofinare.
- Conservare il dispositivo in un ambiente asciutto ed evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e all'acqua piovana.

### Precauzioni

Non utilizzare benzene, diluenti, polveri per lucidatura per non rischiare di danneggiare il prodotto.

Non bagnarlo con acqua per non rischiare che si rompa.

## 5.2 Pulizia all'interno del serbatoio

### 5.2.1 Pulizia del serbatoio attraverso ricircolo di acqua ozonizzata

E' possibile effettuare una pulizia biologica del serbatoio facendo regolarmente circolare acqua ozonizzata al suo interno come indicato qui a lato.

### 5.2.2 Pulizia del serbatoio senza coperchio

### Precauzioni

Non utilizzare benzene, diluenti, detersivi, acqua ozonizzata, per non ridurre le prestazioni e provocare una rottura.

### Come rimuovere il coperchio



**1** Rimuovere il dado.


**2** Tenere il corpo principale e sollevare il coperchio.

### PULIZIA BIOLOGICA

1. Rimuovere il tappo.
2. Riempire il serbatoio con 500 cc. di acqua demineralizzata. Attenzione: l'impiego di piccole quantità di acqua può causare il danneggiamento della pompa a causa dell'alta densità dell'acqua ozonizzata in circolo. Assicurarsi di utilizzare 500 cc di acqua demineralizzata.
3. Rimuovere qualsiasi dispositivo (Doccetta, SuperJetter, Irrigatore) e inserire il tubo all'interno del serbatoio.
4. Premere START per avviare la produzione di acqua ozonizzata.
5. La produzione di acqua ozonizzata terminerà automaticamente. Rimuovere il tubo dal serbatoio e inserirlo in un altro contenitore.
6. Premere START nuovamente e svuotare il serbatoio.
7. Riavvitare il tappo.

#### Come montare il coperchio.

Afferrare il coperchio a V con entrambe le mani, posizionare la punta del coperchio sulla parte superiore del corpo principale e spingere delicatamente.

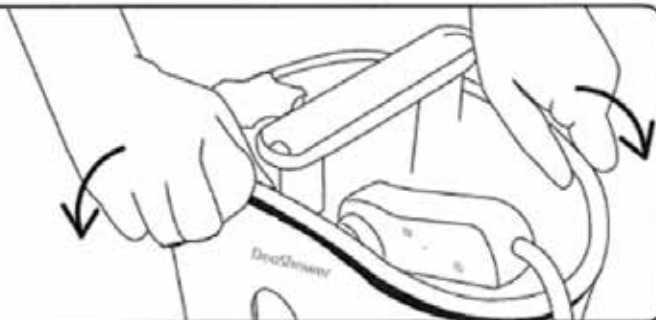

Una volta lavato completamente con acqua demineralizzata, asciugarlo con un panno morbido.

## 5.3 Pulizia del filtro

Periodicamente, pulire il filtro sul fondo del serbatoio. In caso di otturazione del filtro, l'uscita dell'acqua ozonizzata potrebbe risultare difficoltosa. Strofinando con troppa energia, si rischia di rompere la rete del filtro: rimuovere il materiale residuo manualmente e poi asciugare con un panno morbido.

### Precauzioni

Non utilizzare carta assorbente o carta velina, perché potrebbero finire all'interno del dispositivo causando danni.

## 5.4 Manutenzione della doccetta

### Attenzione


Non allargare troppo il portadoccetta aprendolo con forza. Potrebbe staccarsi la fascetta, provocando lesioni.

Se il movimento oscillatorio del portadoccetta diventa troppo lento o troppo veloce durante l'uso:

1. Aprire il portadoccetta A ed estrarre il portadoccetta B.
2. Pulire l'elemento sferico e il cursore del portadoccetta A con un panno bagnato con detergente sintetico.
3. Asciugarli accuratamente e riassemble le parti seguendo le istruzioni in ordine inverso.

## 5.5 Sostituzione della cella interna

La sostituzione della cella è necessaria per mantenere alte prestazioni. Questa operazione richiede tuttavia la presenza di personale qualificato. Contattare, quindi, l'assistenza tecnica autorizzata.

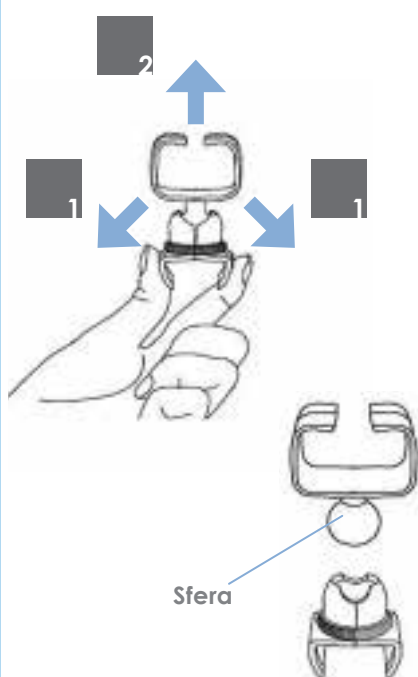

Descrizione	Durata	Collocazione
Cella a spirale	~100 ore	Interno corpo principale



## 6.0 Risoluzione dei problemi

SE...	CAUSA POSSIBILE	MISURE DA ADOTTARE
Non funziona	La spina è inserita?	Inserire la spina.
	L'apparecchio è stato rifornito con acqua demineralizzata?	Rifornire con acqua demineralizzata.
Il serbatoio è stato riempito con acqua di rubinetto	L'acqua di rubinetto non rientra nelle specifiche.	Contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto.
L'acqua ozonizzata non scorre in modo uniforme	Il foro della doccetta è ostruito?	Togliere il cappellino (tipo a vite) della doccetta e rimuovere il materiale di rifiuto.
	Il tubo è chiuso a causa del regolatore del flusso? (solo Modello Ozone Oral Irrigator)	Allentare la rotella del regolatore di flusso.
La spia si accende (non funziona)	È possibile un surriscaldamento (l'apparecchio non è rotto).	Aspettare da 5 a 10 minuti. L'apparecchio si può utilizzare quando la spia si spegne. Se ciò non accade, estrarre la spina dall'alimentazione e contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto.
	La temperatura ambiente è troppo bassa o troppo alta.	Utilizzare il prodotto nel range di temperatura 5-35°C.
La spia lampeggia, poi si accende con luce fissa (funziona)	Ciò accade a causa della durata di vita della cella a spirale. L'acqua scorre, ma l'acqua ozonizzata non viene prodotta.	Rivolgersi al fornitore per sostituire la cella a spirale.
Il pedale non funziona	Il pedale è bloccato da qualche oggetto o da polvere?	Rimuovere l'oggetto con un cotton fioc o simili. Se non si ottengono risultati, contattare il rivenditore da cui è stato acquistato l'apparecchio.



Future Care Technologies